

## Алкотестер брелок с фонариком

Херсон, Україна

Как им пользоваться?

Перед началом измерения не курите и не ешьте в течение 20 минут, не принимайте таблетки от кашля или мятные леденцы — это может повлиять на результат.

После последнего употребления алкогольного напитка должно пройти несколько минут, затем можно проводить измерение.

Для подтверждения результата можно провести повторный тест, но не раньше, чем через 3 минуты.

Для включения алкотестера, необходимо нажать и удерживать кнопку POWER (до 10 секунд). Прибор уведомит пользователя о включении миганием светодиодов — красного, желтого и зеленого цветов. После того, как останется гореть только зеленый индикатор, необходимо поднести алкотестер — брелок ко рту и сделать максимально возможный выдох на отверстие для продувки в течение 3-5 секунд, при этом, кнопку POWER не отпускаем В зависимости от уровня содержания алкоголя в крови вашего организма, на алкотестере, через 4 – 6 секунд, загорится один из индикаторов:

красный — уровень алкоголя в крови превышает 0,05%;

желтый — уровень алкоголя в крови от 0,02% до 0,05%;

зеленый — уровень алкоголя в крови — менее 0,02%.

Согласно требованиям украинского законодательства, содержание алкоголя в крови не должно превышать 0,02%, т. е. если, после измерения, горит желтый или красный светодиод, то за руль лучше не садиться — гарантировано уберете себя от разбирательств с ГАИ.

Питание: 2 батарейки типа AAA (не входят в комплект).

Материал: пластик, электронные компоненты.

Вес: 26 г

В комплект входит инструкция по эксплуатации (на англ. языке).

Этот идеальный подарок для водителя упакован в полипропиленовый пакет и фирменную картонную коробочку.

Доставка по всей Украине осуществляется транспортной компанией «Нова Пошта»

Загляни, выбери, закажи :)

ascent-shop.com

---

Price: **75 грн.**

Тип оголошення:

Торг: неуместеннеуместен

Продам, продаж, продаю

AvizInfo.com.ua

1/2

